


Drempelhulp - Set 1 Montagehandleiding

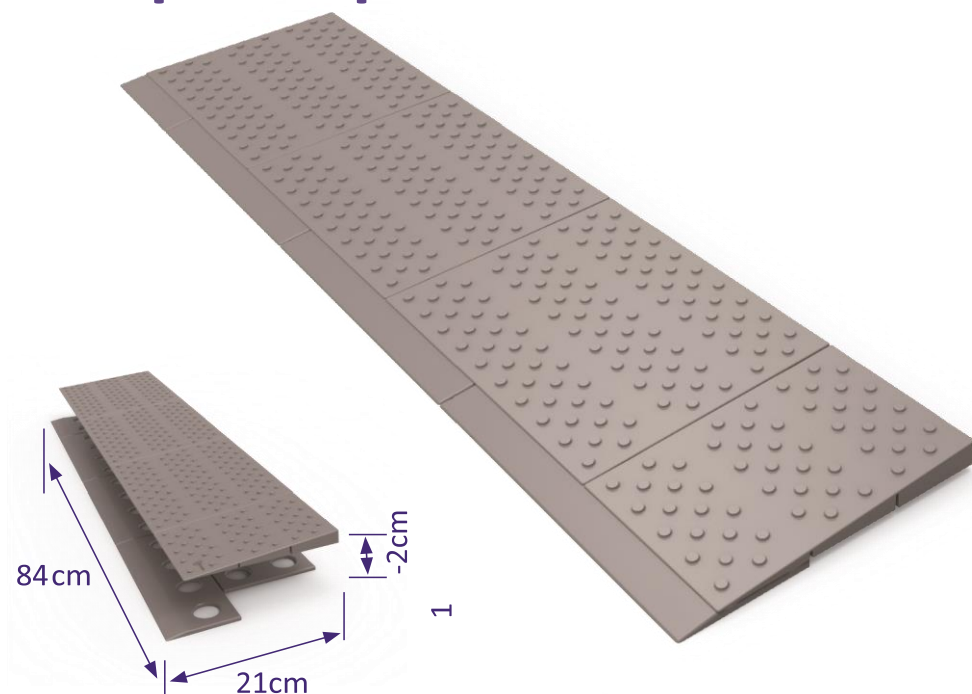

Benodigd gereedschap:



Eventueel aangevuld met een (schroef) boormachine.

Meegelieferd montage materiaal:




Bevestigingsmateriaal, 1 slagplaatje en 3 laminaatvoeten.

Inhoud van de doos



onderdeel	nummer	aantal	artikel nummer
Pastegel heel 4x3	nr. 13	3	8026.100.09
Pastegel half 2x3	nr. 14	1	8026.100.10
Connector 4x1	nr. 10	3	8026.100.11
Connector 2x1	nr. 11	1	8026.100.13
Connector 2x2	nr. 12	3	8026.100.12


Optionele accessoires, niet in de doos

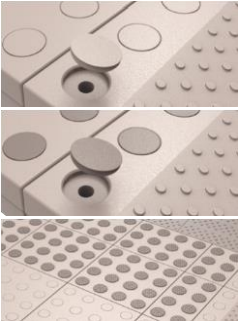


Vuldop grijs		14	8025.010.02
Vuldop bruin		14	8025.010.03
Antislip doppen		14	8025.010.01

Montage drempelhulp

Lees de handleiding eerst goed door voordat u gaat monteren.

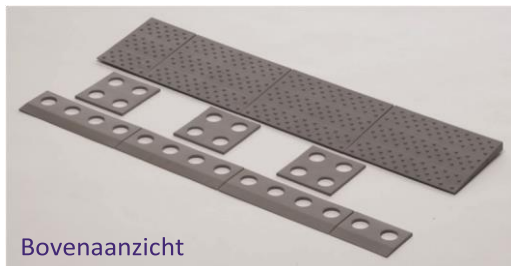


Bovenaanzicht

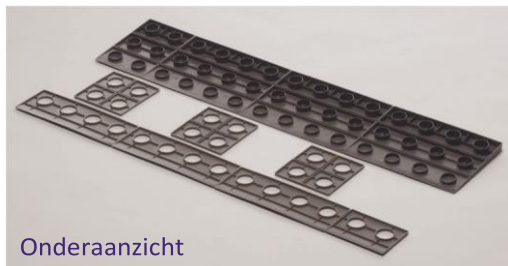

Onderaanzicht

Indien noodzakelijk kunt u de SecuCare drempelhulp aanpassen qua hoogte, bij Set 1 kunt u de hoogte verlagen met maximaal 10 mm (in stappen van 5 mm). Hiervoor zijn snijlijnen aangebracht in de kunststof delen.

1 Bepaal de juiste hoogte.

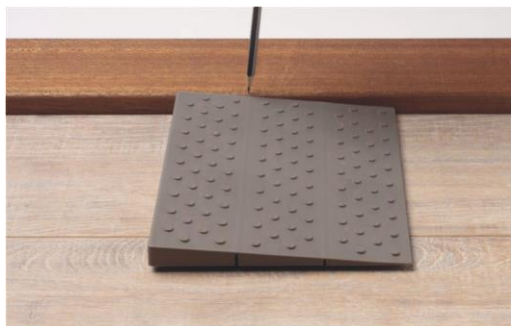



2 Snij op maat.



3 Indien u het schuine deel heeft moeten aanpassen qua hoogte, dient u ook de vierkante connector aan te passen.




- 4** Plaats de connectoren, vierkant en langwerpig, zoals op onderstaande afbeelding. U kunt deze met de hand erop drukken, maar ook door het zwarte kunststof slagplaatje te plaatsen op de connector klikverbinding en deze vast te tikken met een hamer. Zorg voor een stevige vlakke ondergrond. Altijd het slagplaatje gebruiken!

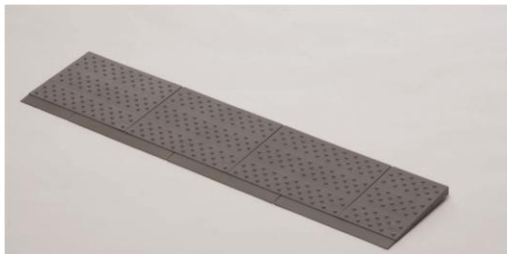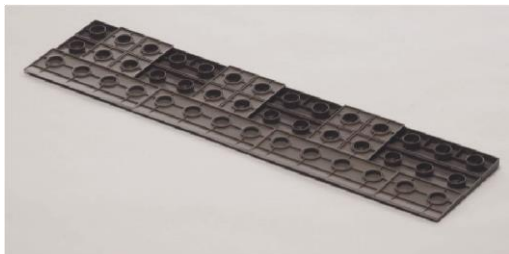

- 5** Het bevestigen van de drempelhulp op een gladde ondervloer (zoals bijvoorbeeld laminaat, of gladde tegels) kan met de meegeleverde vlakke laminaatvoeten. Bevestig de meegeleverde dubbelzijdige tape plakkers op de laminaatvoeten.

- 6** Reinig / ontvet de ondergrond grondig! Bevestig de laminaatvoeten (verdeel ze over de breedte van de drempel, aan elk uiteinde en in het midden) en verwijder de schutlaag van de dubbelzijdige tape.

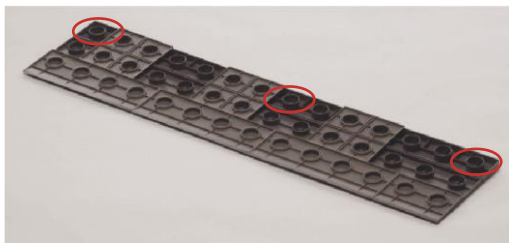

- 7** Plaats nu de SecuCare Drempelhulp op de juiste plek en druk deze stevig aan. U kunt naderhand de drempel voorzichtig verwijderen en weer terug klikken op de laminaatvoeten.




Het bevestigen van de drempelhulp aan een opstaande rand/drempel.

- 8** Bepaal waar de 3 bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbereide uitsparingen uit.
- 9** Teken af op de opstaande rand/drempel, boor voor en bevestig de schroef en ring. Draai niet helemaal vast. Plaats nu de SecuCare drempelhulp over de schroef/ring.



- 10** Het eindresultaat:

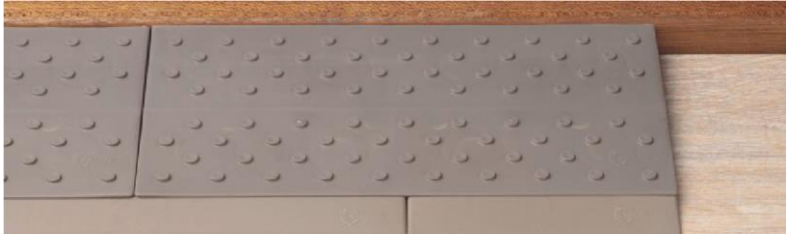

Disclaimer en garantie voorwaarden - SecuCare drempelhulp

Versie 3.0 januari 2016 **Belangrijk**

- Lees zorgvuldig de montage instructie en disclaimer door.
- Zorg voor een stevige en vlakke ondergrond.
- Pas op voor uitglijden in bepaalde weersomstandigheden.
Strooi zout in geval van ijzel of gebruik het systeem dan niet.
- Zorg ervoor dat dit systeem geen gevaar/hinder veroorzaakt (bijv. in een woning galerij).
- De omgeving dient voldoende verlicht te zijn zodat het systeem goed zichtbaar is, speciaal in een publieke omgeving en voor mensen met een zichtbeperking

Algemene bepalingen

- Plaatsing en gebruik van de drempelhulp geschiedt op eigen risico.
- De drempelhulp is uitsluitend ontworpen voor, en geschikt voor, gebruik door personen van gemiddeld gewicht te voet, met een rollator of in een rolstoel, en derhalve voor geen enkele andere toepassing.
- De ondergrond waarop de drempelhulp wordt gemonteerd, dient vlak en stabiel en solide te zijn.
- Het systeem nooit gebruiken in de buurt van, of in combinatie met, ontvlambare materialen. Het systeem is in dat geval ook niet geschikt voor vlucht routes.
- De hellingshoek van de drempelhulp dient zo klein mogelijk te zijn. Indien de situatie ter plekke dwingt tot een steile hoek, dient de gebruiker(s) gedurig hulp geboden te worden bij gebruik van de drempelhulp.
- Indien verzagen van de drempelhulp plaatsheeft, dienen voldoende beschermende middelen (veiligheidsbril, oorbeschermers e.d.) te worden gedragen.
- Kleine onderdelen van de drempelhulp dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden, om inslikken etc. te voorkomen.
- Bij gebruik van naaldhakken wordt dringend aanbevolen het systeem uit te rusten met los leverbare anti slip doppen (art. nr 8025.010.01, 14 stuks). Hierdoor ontstaat een vlak geheel (n.v.t. bij set 1).
- Na montage en daarna van tijd tot tijd, dient te worden gecontroleerd of de drempelhulp in de situatie ter plekke stevig genoeg is voor normaal gebruik.
- De omgeving van het drempelsysteem dient gedurig voldoende verlicht te zijn, waardoor de drempelhulp goed zichtbaar is voor anderen, voor wie de drempelhulp immers een obstakel kan zijn; voor gebruik van de drempelhulp op galerijen is een drempelsysteem verkrijgbaar met schuine zijkant.
- Afhankelijk van de hoogte van het systeem is een geleide-rail (die ongelukken voorkomt) aan weerszijden van het systeem aan te raden/verplicht. Controleer uw lokale wetgeving hierop of neem contact op met uw leverancier of Secu voor meer informatie.

- Lokale regels voor het kenbaar maken van de drempelhulp dienen te worden nagekomen. In geval van gladheid van de drempelhulp, bijvoorbeeld door weersomstandigheden doch niet beperkt daartoe, dienen passende maatregelen tegen uitglijden door die gladheid genomen te worden waarbij bijvoorbeeld de drempelhulp tijdelijk kan worden verwijderd.
- Bij twijfel door de consument over enig aspect van montage of gebruik van de drempelhulp dient onverwijld contact op te worden genomen met de leverancier van de drempelhulp, van wie de consument dat heeft betrokken.

Onderhoud

- Van tijd tot tijd dient de stevigheid van de drempelhulp en van de onderlinge verbindingen te worden gecontroleerd.
- De drempelhulp en de ondergrond dient gedurig schoon te worden gehouden. Elke soort schoonmaakmiddel en zelfs een autoclaaf kan gebruikt worden ter reiniging van de drempelhulp.
- Eventueel grof vuil kan worden verwijderd met een borstel en daarna dient de drempelhulp afgespoeld te worden met water.

Garantie

Voor inroeping van garantie op de drempelhulp is overlegging van het bewijs van aankoop van de drempelhulp voorzien van aankoopdatum en productomschrijving of productnaam, vereist. Garantie wordt gegeven voor de duur van vijf jaar gerekend vanaf de datum van aankoop van de drempelhulp door de consument. De garantie geldt uitsluitend aangaande eventuele productiefouten van de in de drempelhulp gebruikte materialen. Een terecht beroep op garantie leidt uitsluitend tot een aanspraak op kostenloze levering door Secu aan de consument van een vervangend drempelsysteem; Secu is niet gehouden tot enige andere prestatie. Secu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige zaakschade of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage van de drempelhulp en/of tijdens gebruik van de drempelhulp; enige aansprakelijkheid welke desondanks voor rekening van Secu komt, is beperkt tot het bedrag dat in het bewuste geval wordt uitgekeerd door Secu's aansprakelijkheidsverzekeraar.

De garantie vervalt met onmiddellijke ingang door:

- Montage die niet conform is aan de bij de drempelhulp geleverde montageinstructie resp. geschiedt met ander dan het meegeleverde montage materiaal;
- Verkeerd, oneigenlijk of te zwaar belastend gebruik (max. belasting 850 kg/m²) van de drempelhulp;
- Opzettelijke of door verwaarlozing van de drempelhulp ontstane beschadigingen;
- Bij toepassing van de drempelhulp op een oneffen en/of instabiele en/of onvoldoende solide ondergrond;
- Beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, door verkeerd onderhoud of door gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);
- Invloed van chemische/elektrochemische stoffen en/of invloed van elektriciteit;

Wijzigingen voorbehouden

SecuCare is een merk van **SECUPRODUCTS BV**
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL Tel.
+31-252-620901 - info@secu.nl - www.secure.nl

